

# Tag med hjem Zen-O™ ilt-koncentrator



## Iltmaskinen kan:

- Producere ilt 24/7 tilsluttet en strømkilde.
- Producere ilt flow på 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 liter pr minut.
- Producere ilt via de interne batterier, se varighed i tabellen.

Hvor længe holder iltmaskinen på 100% opladte batterier ved et kontinuerligt ilt flow

Liter/min.	0,5	1,0	1,5	2,0
Tid	5:35	3:08	2:00	1:40

## Tænd iltmaskinen

1. Tryk på tænd knappen.



2. Tjek af ilt står på kontinuerlig  i skærmen skal der stå "Kont."

3. Tryk på  for at opnå det ønskede liter pr minut.

## Betjeningspanel

Alarm lydløs


Skærm

Grøn lys tændt

Tænd / sluk

Batteriindikator

Fjern akustisk alarm

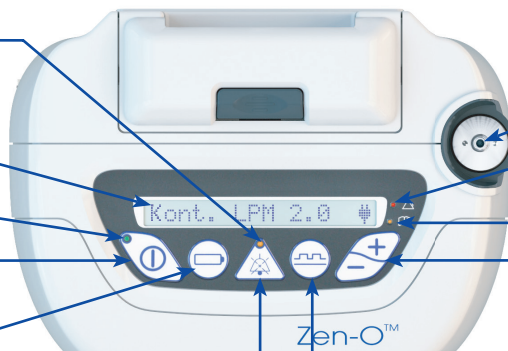

Ilt studs

Rød kritisk advarsel

Gul - advarsel

Indstil flow

Skift mellem kontinuerlig/pulse flow

## Iltslange



## Strømsluk



## Hjælp

Du kan kontakte VitalAire året rundt, der vil altid være en ilt-instruktør på vagt, som kan afhjælpe problemstillinger.

Telefon 44 92 35 44

## Sikkerhedsforskrifter



Rygning samt brug af åben ild er forbudt i nærheden af ilt-udstyr.

Anvend aldrig olier, fedt og lignende på ilt-udstyret.



Følg altid lægens ordning. Du må kun ændre forbruget efter aftale med din læge!

Forsøg aldrig selv at reparere ilt-udstyret.